

よ あ きのうつ 読み上げ機能付き

かくだいどくしよき つか 拡大読書器の使いかた

① 電源を入れる(長押し)

② モードを選ぶ(5種類)


フルカラー → 黒背景に白文字 → 白背景に黒文字

→ 黒背景に黄文字 → 青背景に黄文字 → フルカラー(くり返し)

③ 読み上げマークを押す

→ (再生・停止) マークで、読み上げを開始・一時停止します。

→ 右上の × (終了) マークで、読み上げ画面を閉じます。

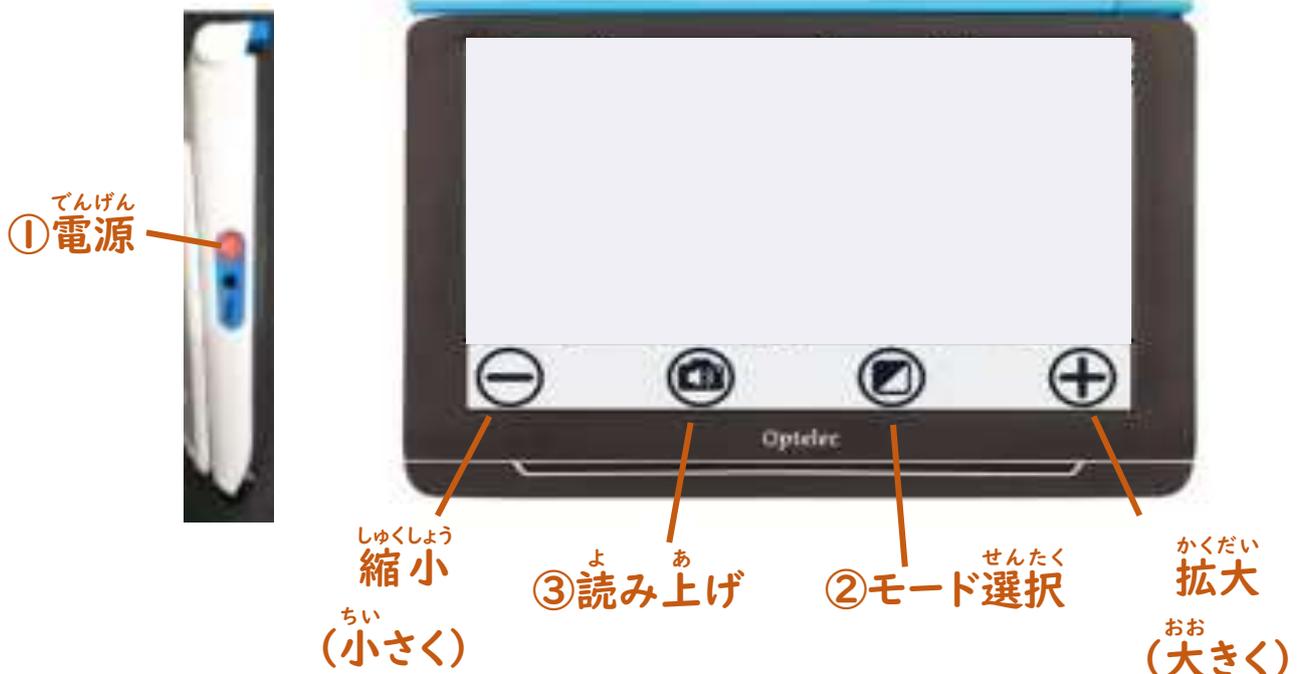

カメラを立てるとA4 サイズまで表示できます

(Opletac コンパクト 10 スピーチ)